



NOEN FORHOLDSREGLER V/BRUK AV BARNE-PADS

Hjertestarteren er utstyrt med pads til bruk på hovedsakelig voksne personer, men i nødstilfelle kan man allikevel bruke de på barn under 25 kilo (ca. 8 år).

Har man derimot barne-pads tilgjengelig kan man bytte i tilfelle hjertestarteren må brukes på et barn. Forskjellen er styrken strømstøt som blir gitt.

Barn får dermed et mindre strømstøt enn en voksen når barne-pads er påmontert.

Uansett det er bedre å gi et sjokk en ikke uansett med eller uten barne-pads i en nødsituasjon. NB! Barn under 1 år har dessverre gjerne ikke noen fordel av at det brukes sjokk i forbindelse med gjenopplivning.

Vi anbefaler ikke å bytte fra voksen-pads til barne-pads før eventuell nødsituasjon.

I tilfelle nødsituasjon er det en enkel sak å bytte til barne-pads

- 1. Ha barne-pads lett tilgjengelig (oppbevares gjerne i vesken til hjertestarteren)**
- 2. Åpne maskinen (Merk! Kun i nødstilfelle)**
- 3. Plugg ut pads for voksne (like enkelt som å ta ut/inn en veggkontakt)**
- 4. Plugg så i pads ment for barn (like enkelt som å ta ut/inn en veggkontakt)**
- 5. Lytt til hjertestarteren sine anvisninger for gjenopplivning**



folkestarteren

Se gjerne også vår demonstrasjonsvideo av hvordan en hjertestarter brukes på
www.folkestarteren.no